

**DISPOSITIVO MEDICO
CUSCINO ANTIDECUBITO
GEL VISCOELASTICO COMPATTO
P250B1, P250B1 MEMORY e P250B1 SOFT
ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE**

REVISIONE n°2



ALEN CHIMICA s.r.l.

Alen Chimica s.r.l. – Via del Lavoro, 4 – VIGONZA (PD)

Tel. 049 8933638 – Fax 049 8952000

E-mail: info@alenchimica.com

DATA DI REVISIONE: 16/04/2021



DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO

I cuscini P250B1, P250B1 vers memory, e P250B1 soft grazie alle loro caratteristiche fisico –meccaniche , permettono al paziente di affondare e distribuire il peso su una maggiore superficie.

I cuscini P250B1 e P250B1 memory sono composti da una lastra in plastogel che appoggia su un base di poliuretano espanso per aumentare il comfort e la stabilità del paziente.

Il Dispositivo P250B1 vers. Memory presenta anche una lastra in PU memory foam.

Il dispositivo P250B1 soft è costituito da gel di poliuretano e schiuma di poliuretano che formano un unico pezzo. Il dispositivo risulta preformato con l'alloggiamento delle ossa ischiatiche.

Il rivestimento di tutti i cuscini è in poliuretano.

INFORMAZIONI GENERALI SUI CUSCINI ANTIDECUBITO

La formazione di piaghe da decubito è dovuta principalmente a una prolungata immobilità durante la degenza a letto e inabilità del paziente, creando persistenti pressioni a livello di cute in corrispondenza delle prominenze ossee. L'utilizzo del dispositivo antidecubito che va a diminuire l'intensità di queste pressioni deve essere associato, per una corretta prevenzione della formazione di piaghe da decubito, a un cambio di posizione ogni 2/3 ore, sollevando il paziente e non trascinandolo per evitare attriti e sfregamenti. Si ricorda, infine, di controllare l'integrità cutanea mantenendola asciutta, pulita e idrata.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

Codici P250B1 e P250B1 MEMORY


Il dispositivo deve essere posizionato con la cerniera nella parte inferiore.

Codice P250B1 SOFT (foto sotto)

Posizionare il dispositivo sul sedile facendo attenzione a rispettare la posizione corretta: la cerniera deve essere posizionata nella parte inferiore e verso lo schienale del sedile per rispettare la preformatura del dispositivo.

Sull'etichetta compare la dicitura "parte posteriore" per facilitare l'installazione del dispositivo.

Al momento dell'acquisto il dispositivo è posizionato correttamente.

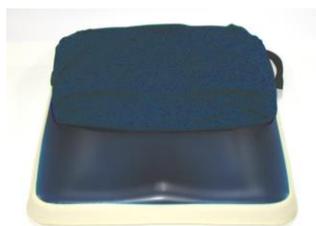

Parte anteriore

AVVERTENZE E MODALITA' D'USO

- Non esporre il dispositivo a temperatura continua superiore ai 40°C.
- Utilizzare il dispositivo sempre con la fodera in dotazione.
- Non ingerire parti del dispositivo
- Utilizzare lontano da fiamme libere e fonti di calore
- Il prodotto non è monouso tuttavia si consiglia di far utilizzare il dispositivo ad un solo paziente.
- Per un corretto utilizzo il dispositivo deve essere sempre tenuto integro in tutte le sue parti. In caso di smontaggio del dispositivo, le parti che lo compongono devono essere montate come in origine.
- Mantenere la lastra contenuta nel dispositivo sempre in posizione orizzontale per evitare rotture della stessa. Si raccomanda inoltre di sollevare il paziente per qualsiasi spostamento, evitando lo scivolamento del paziente sul dispositivo, per evitare la formazione di raggrinzamenti e/o rotture della lastra.
- Una eventuale rottura o sfaldamento della lastra contenuta all'interno, pone fine all'effetto antidecubito del dispositivo stesso.
- La sostituzione di eventuali parti che compongono questo dispositivo con altri non originali, esonera la casa costruttrice da ogni eventuale responsabilità.
- L'utilizzo del presente Dispositivo è indicato per pesi sino a 120 kg. Si sconsiglia l'uso per pazienti di peso superiore.
- Il dispositivo contiene piccole parti che possono essere ingerite o inalate causando soffocamento. Si richiede la supervisione da parte di un adulto.
- Gli utenti con disabilità visive possono consultare le "istruzioni d'uso e manutenzione" del dispositivo sul sito www.alenchimica.com oppure richiedere le istruzioni in formato digitale al seguente indirizzo: commerciale@alenchimica.com

Si raccomanda di segnalare ad Alen Chimica Srl e all'autorità nazionale competente qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo.

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO E PULITURA

- per la pulizia non è necessario lo smontaggio del dispositivo: la fodera è impermeabile
- lavare la fodera del dispositivo passando leggermente un panno umido con sapone neutro sulla superficie a temperatura non superiore a 30°C e lasciare asciugare.
- Non usare altri solventi o detersivi
- Asciugare all'aria lontano da fonti di calore
- La fodera può essere lavata in lavatrice ad una temperatura di 60°C.
- Non centrifugare e non strizzare.
- Non stirare
- Non strofinare energicamente sulla superficie
- Se necessario, il dispositivo P250B1 SOFT può essere pulito passando sopra una spugna umida. Non immergerlo in acqua o qualsiasi altro liquido.

Raccomandiamo l'acquisto di una seconda fodera da usare come ricambio di quella in dotazione per evitare l'uso del dispositivo senza fodera.

SPECIFICHE DI CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE

- Il dispositivo può essere manipolato come un normale cuscino d'appoggio.
- Conservare in luogo asciutto.
- Il dispositivo deve essere conservato e usato esclusivamente in posizione orizzontale

EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI NON DESIDERATI

Non si è a conoscenza di effetti collaterali

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Lo smaltimento del dispositivo deve essere effettuato come un normale rifiuto non tossico, nell'ambito delle leggi che lo regolamentano.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

In base alle condizioni di questa garanzia ALLEN CHIMICA s.r.l. garantisce i propri prodotti per un periodo di 2 (due) anni dal momento dell'acquisto. Se durante il periodo di garanzia il dispositivo, in normali condizioni di utilizzo, dovesse presentare malfunzionamenti dovuti a difetti di costruzione o relativi materiali della ALLEN CHIMICA s.r.l. potrà procedere alla riparazione e/o alla sostituzione. La garanzia è valida solo se il prodotto da riparare è accompagnato da documento comprovante la data di acquisto il timbro e la firma del rivenditore (scontrino, documento di trasporto, fattura ecc.). E' discrezione di ALLEN CHIMICA s.r.l. la decisione se riparare il prodotto difettoso o procedere alla sua sostituzione. La presente garanzia non copre eventuali danni dovuti alla normale usura o a un utilizzo non appropriato. Inoltre la garanzia non copre danni del prodotto derivanti da eventi fortuiti, modifiche o adattamenti. Qualora si proceda alla riparazione in garanzia il prodotto godrà di un periodo di garanzia pari alla parte residua della garanzia originale, comunque non inferiore a 90 giorni. **Si raccomanda di inviare il prodotto in condizioni igieniche perfette.**

CERTIFICATO DI GARANZIA

DATA DI VENDITA	RIVENDITORE
<hr/>	(TIMBRO E FIRMA)
NUMERO DI LOTTO	
(Reperibile presso l'etichettatura del prodotto) <hr/>	

La presente garanzia non è valida se non è completa in tutte le sue parti e deve accompagnare il dispositivo in caso di difetto.